

Conique / fin distal osseuse

Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



Avec Your® Liner

Membre



Modèle 3D



Your® Liner



Indication

Le membre présente une forme conique. La circonférence de la section distale est sensiblement plus petite que celle de la section supérieure du membre résiduel. L'extrémité distale du fémur n'est pas couverte par suffisamment de tissu mou / affleure sous la peau.



Fonctions clés



Sur-mesure - depuis scan 3D



Compressions adaptées

Problèmes typiques


Manchon standard trop lâche sur le segment distal

Un manchon standard adapté au segment proximal du membre peut être trop lâche sur le segment distal. Dans ces conditions, des poches d'air peuvent apparaître entre la peau et le manchon, entraînant un risque de lésions cutanées par friction, de transpiration excessive, etc.




Manchon standard trop serré sur le segment proximal

Un manchon standard adapté au segment distal du membre peut être trop serré sur le segment proximal. L'extrémité proximale du manchon peut également se dérouler d'elle-même.

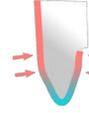

Protection insuffisante de l'extrémité fémorale

Un manchon standard peut ne pas fournir une protection suffisante sur l'extrémité fémorale, l'exposant ainsi à des pics de pression qui peuvent entraîner des escarres ou des lésions cutanées.

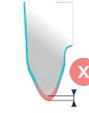

Forme et compressions adaptées

Grâce à sa forme personnalisée et à ses compressions adaptées, Your® Liner amène un ajustement intime et des compressions adéquates tout au long du membre, éliminant ainsi le problème des compressions trop hautes ou trop basses, et des poches d'air entre la peau et le manchon.



Sur-épaisseur de protection sur l'extrémité fémorale

Avec la possibilité d'ajuster les épaisseurs locales, l'extrémité fémorale peut être protégée avec une sur-épaisseur locale, afin de réduire le risque d'apparition de pics de pression et leurs conséquences néfastes.



La différence Your® Liner

