

Exostoses

Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



Avec Your® Liner

Membre



Modèle 3D



Your® Liner



Indication


Une excroissance osseuse ou exostose s'est développée, et donne au membre résiduel une forme atypique et/ou des sensibilités locales uniques.



Fonctions clés



Sur-mesure - depuis scan 3D

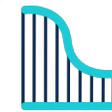

Épaisseurs ajustables

Problèmes typiques

Manchon standard est étiré sur les proéminences osseuses

Pour épouser la forme du membre, le manchon standard sera étiré sur les proéminences osseuses, exerçant une pression sur ces zones sensibles. La couche d'élastomère étirée peut également offrir une protection insuffisante, exposant davantage les tissus sous-jacents.



Air pocket at distal end

Un manchon standard peut ne pas être en mesure de s'adapter correctement à la forme inhabituelle de l'exostose, laissant de l'air emprisonné entre la peau et le manchon. Cela peut entraîner des problèmes de transpiration excessive et de friction entre la peau et le manchon.



Forme adaptée et sur-épaisseur de protection sur l'exostose

Comme il est fabriqué à partir d'un scan 3D du membre, Your® Liner offre une forme adaptée à l'exostose, éliminant ainsi le risque que le liner soit trop étiré sur les extrémités osseuses, et que des poches d'air soient piégées entre le liner et le membre résiduel.

De plus, la possibilité d'appliquer localement des sur-épaisseurs de protection adéquates permet d'appliquer une épaisseur d'élastomère supplémentaire pour limiter le risque d'apparition de pics de pression sur l'excroissance osseuse.



La différence Your® Liner