

Péroné proéminent

Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



Avec Your® Liner

Membre



Modèle 3D



Your® Liner



Indication


Le péroné est saillant, donnant une forme inhomogène au membre. Cette zone peut provoquer des douleurs si elle est exposée à une pression. La peau de cette zone peut être sujette à des blessures récurrentes.



Fonctions clés



Sur-mesure - depuis scan 3D

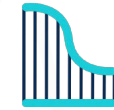


Épaisseurs ajustables

Problèmes typiques


Manchon standard trop étiré sur le péroné

Pour s'adapter au membre, le manchon standard sera étiré sur les extrémités osseuses saillantes, appliquant une compression supplémentaire sur le péroné.

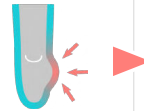

Protection insuffisante du péroné

Les manchons standards présentent des profils d'épaisseur prédéfinis. Un manchon peut présenter un profil épais pour protéger correctement le péroné saillant, mais il comprendra ainsi des épaisseurs inutiles dans d'autres zones, ce qui l'alourdit, augmente le risque de pistonage, et diminue la proprioception. Un manchon trop fin peut au contraire fournir une protection insuffisante au péroné, exposant le membre à des pics de pression.

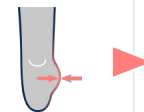

Pas de sur-compression sur le péroné

Comme il est fabriqué à partir d'un scan 3D, la forme d'un Your® Liner peut s'adapter à la forme saillante du péroné, ce qui élimine le risque que le liner soit trop étiré et applique une sur-compression sur le péroné.



Sur-épaisseur de protection sur le péroné

La possibilité d'appliquer localement des sur-épaisseurs permet de protéger localement le péroné pour limiter le risque d'apparition de pics de pression. Le reste du manchon peut présenter un profil fin pour éviter d'alourdir le manchon et limiter les risques de pistonage et de proprioception limitée.



La différence Your® Liner

